

PACK ASEPTONET

100 LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR SURFACES,
PETIT MATÉRIEL, DISPOSITIFS MÉDICAUX.

Dispositif médical classe IIa.



DESTINATIONS

Nettoyage et désinfection:

- des dispositifs médicaux non-invasifs et non-immérgeables (petit matériel en milieu médical et dentaire).
- Surfaces dures non poreuses en milieu médical et dentaire.

FORMULE

Tolérance testée sous contrôle dermatologique.
Parfum : menthol.

Actifs : Ethanol (CAS 64-17-5) (<3%),
Dimethylbenzylammonium chloride (CAS 7173-51-5),
Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (<1%).

MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi à usage unique.
Soulever le couvercle et retirer l'étiquette autocollante. Sortir une lingette du paquet.
Passer 3 lingettes par m² de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES A 20°C

BACTÉRICIDE	EN1276*, EN13727**, EN13697*, EN14561**	5 min
LEVURICIDE	EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN14562**	5 min
FONGICIDE	EN14562** sur Aspergillus Fugimatus.	5 min
TUBERCULOCIDE	EN14348**, EN14563** sur Mycobacterium Terrae.	15 min
ACTIF SUR VIRUS	EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus**.	1 min
	EN14476** sur Rotavirus.	15 min

*3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton, ** 3g/L albumine bovine

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit destiné aux professionnels.
Éviter le rejet dans l'environnement.
Aucun pictogramme de danger.
En cas d'incident, contact le CAP le plus proche (01.45.42.59.59). Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

CONDITIONNEMENT

REF : ASEP0002

Pack de 100 lingettes épaisses 180 x 200mm.
Carton de 12 packs.
Palette de 50 cartons.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée d'utilisation après ouverture : 3 mois.

Langues : français, anglais, néerlandais, espagnol, portugais, italien.

EAN13 : 3468080785571

Produit fabriqué en France.