

Liquide isolant toutes résines**Introduction**

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi le liquide isolant ISO-K. CANDULOR ISO-K est une solution aqueuse à base d'alginate utilisée comme isolant entre la résine et le plâtre ou le plâtre et le plâtre.

Utilisé correctement, ISO-K permet un démoulage aisé de la prothèse, sans résidu de plâtre.

Mise en œuvre

Pour obtenir un bon résultat, la cire doit être entièrement ébouillantée (utiliser éventuellement un solvant) et il faut utiliser un modèle/clé/contre-partie en plâtre bien saturé d'eau. Éliminer les restes de cire et de graisse éventuels à l'eau bouillante, sans détergent.

Appliquer ISO-K avec un pinceau souple sur le modèle chaud ou déjà refroidi. Attention : le modèle ne doit pas être trop chaud lors de l'application d'ISO-K ! Appliquer l'isolant régulièrement, sans former de « flaques ». Toujours appliquer une 2de couche après le séchage complet de la 1ière couche. Il est très important d'attendre le séchage complet de la première couche avant d'appliquer la deuxième couche. Ne pas éliminer l'isolant excédentaire à l'air comprimé !

Conseil pour le traitement :

Le modèle/clé/contre-partie en plâtre doit être plongé pendant 15 min au moins dans de l'eau chaude (40-45°C).

Après avoir versé la quantité d'ISO-K requise dans un petit récipient, appliquer le produit avec un pinceau à poils souples préalablement humidifié avec de l'eau.

Après chaque utilisation, bien rincer ce dernier sous l'eau du robinet.

Remarque

Une sédimentation éventuelle n'altère aucunement le pouvoir isolant. Agiter l'isolant avant l'utilisation permet d'éliminer les stries ainsi que les sédiments.

Stockage

Conserver à température ambiante (2–28 °C / 36–82 °F)

Stabilité au stockage

3 ans dans les conditions précisées ci-dessus.

Lire aussi les indications qui figurent sur l'étiquette !

Conditionnement

559537 – ISO-K bleu 500 ml

559538 – ISO-K bleu 1000 ml

559539 – ISO-K bleu 5000 ml

559540 – ISO-K rose 500 ml

559541 – ISO-K rose 1000 ml

559542 – ISO-K rose 5000 ml

Mise en garde

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans le domaine dentaire. La mise en œuvre se fait conformément au mode d'emploi. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages résultant du non respect des consignes de mise en œuvre ou du champ d'application. Ceci est également valable lorsque le produit est mélangé à des produits de concurrents ou mis en œuvre avec de tels produits. En outre, l'utilisateur est tenu, avant toute utilisation, de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté au but visé, d'autant plus lorsque le but en question ne figure pas dans les consignes de mise en œuvre.